

Nazalni Aspirator na baterije

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

- Vodootporan
- Nizak nivo buke
- Ergonomski dizajn za lakše korišćenje
- Velika posuda za sekret koja se lako pere
- Čuvanje u uspravnom položaju
- 2 veličine silikonskih navlaka
- Radi na 2 AA baterije




Namena: brzo i nežno otklanja suvišni sekret iz nosa radi olakšanja infekcije gornjeg respiratornog trakta.

REF
ME8202X


FDA CE 0120

Čišćenje aparata:


- 1 Proverite da li su gornji i donji poklopac čvrsto spojeni pre čišćenja aparata.

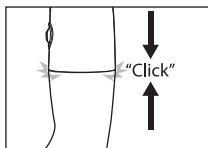


- 2 Skinite silikonski vrh.

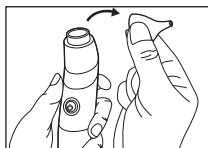


- 3 Uхватite posudu za sekret između palca i kažiprsta.

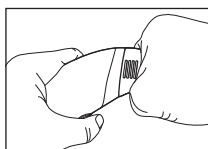

- 4 Polako savijte posudu za sekret ka dole da bi ste je odvojili od osnove.

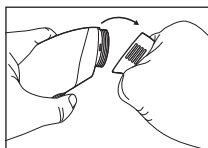

- 5 Posle nekoliko korišćenja aparata uklonite silikonske prstenove sa osnove posude za sekret i očistite ih. Oni se ne moraju čistiti posle svakog korišćenja.

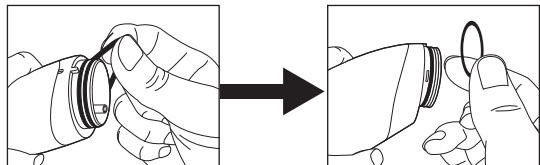

4

Upozorenja


- Pre upotrebe ovog aparata, pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu. Sačuvajte ovo uputstvo kao podsetnik.
1. Ovaj aparat nije igračka; ne dozvolite deci da se igraju sa njim. Držite aparat van domašaja dece da biste sprečili eventualno gutanje sitnih delova aparata od strane dece.
 2. Aparat je namenjen za čišćenje zapeščenog nosa; ne koristite ga u bebinih ustima ili ušima.
 3. Obavezno očistite aparat ukoliko je količina nakupljenog sekreta veća od preporučene maksimalne količine (oko 4 ml). Aparat obavezno temeljno očistite i osušite pre i posle upotrebe (pogledajte odeljak "Čišćenje aparata").
 4. Nemojte ubacivati silikonski vrh isuviše duboko u nozdrvu.
 5. Nemojte predugo koristiti aparat, nekoliko sekundi je dovoljno.
 6. Nemojte koristiti aparat ukoliko u nozdrvama postoje rane, simptomi upale ili krvarenje iz nosa.
 7. U slučaju da dođe do infekcije, groznice, iritacije nozdrva ili krvarenja iz nosa, prestanite sa upotrebom aparata i konsultujte doktora.
 8. Aparat služi samo za ličnu upotrebu.
 9. Silikonski vrh je deo aparata koji dolazi u neposredan dodir sa korisnikom.
 10. Nemojte modifikovati bilo koji deo aparata. Nemojte rasklapati aparat bez prethodnog čitanja uputstva za upotrebu.
 11. Zamenite baterije kada primetite da je usisna moć aparata oslabila tokom upotrebe.
 12. Radni ciklus: 30 sekundi uključen / 2 minuta isključen.
 13. Očekivani životni vek ovog aparata je 3 godine kod uobičajenog korišćenja.

Upozorenja u vezi baterija



1. Koristite isključivo alkalne baterije.
2. Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa.
3. Nemojte istovremeno koristiti alkalne, obične (karbon-cink) i punjive (nikl-kadmijum) baterije.
4. Nemojte istovremeno koristiti stare i nove baterije.
5. Prilikom ubacivanja baterija vodite računa o njihovom polaritetu.
6. Istrošene baterije što pre izvadite iz aparata.
7. Vodite računa da sve kontakte površine budu čiste pre ubacivanja baterija.
8. Baterije mogu eksplodirati ukoliko nisu odgovarajućeg tipa.
9. Izvadite baterije ukoliko nećete koristiti aparat duži vremenski period.

1

6. Temeljno operite delove aparata čistom vodom i blagim deterdžentom/sapunom. Isperite osnovu posude za sekret mlazom čiste vode. Osušite delove pre ponovnog sklapanja.

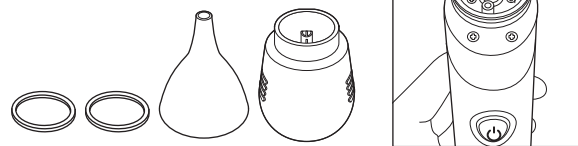

7. Ponovo sklopite delove aparata na način prikazan na donjim ilustracijama.

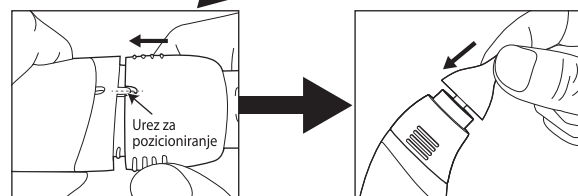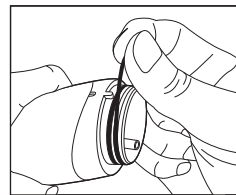

*Pravilno poravnajte urez za pozicioniranje sa posudom za sekret.


8. Proverite da li su svi delovi aparata lepo vraćeni na svoje mesto.

5

Sadržaj pakovanja




- 1 aparat
- 2 veličine silikonskog vrha (za decu i odrasle)
- 1 uputstvo za rukovanje
- 2 rezervna silikonska prstena (za decu i odrasle)

Delovi aparata

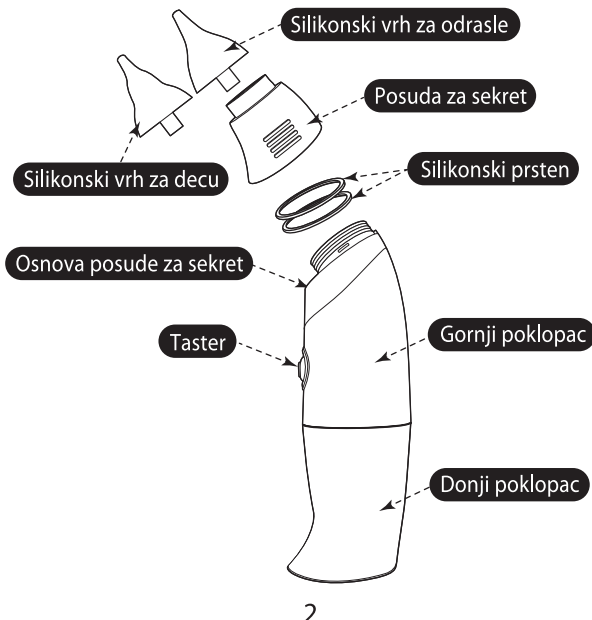

Ukoliko je količina nakupljenog sekreta veća od preporučene maksimalne količine (oko 4 ml) u posudi za sekret ili ako vidite da sekret curi iz otvora za vazduh sa zadnje strane osnove za posudu za sekret, sledite uputstva koja slede:

- 1 Proverite da li su gornji i donji poklopac čvrsto spojeni pre čišćenja aparata.
- 2 Skinite silikonski vrh i posudu za sekret.
- 3 Potopite osnovu za posudu za sekret u čistu vodu kao što je prikazano na ilustraciji desno. Držite taster oko 15 sekundi i unutrašnja pumpa će biti očišćena.
- 4 Voda će ulaziti i izlaziti iz unutrašnje pumpe u smeru prikazanom na ilustraciji 4.
- 5 Prospite zaprljanu vodu, sipajte čistu i ponovite korak 3 nekoliko puta ako je potrebno.
- 6 Izvadite aparat iz vode kada završite čišćenje. Zatim držite taster još oko 30 sekundi dok se unutrašnja pumpa ne osuši.
- 7 Osušite osnovu posude za sekret i sklopite aparat.

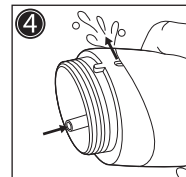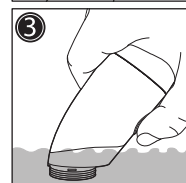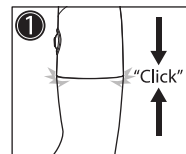

Informacije o radu, čuvanju i transportu aparata

Radna temperatura i vlažnost	Temperatura: 5°C~40°C Vlažnost: 15% ~ 93% Atmosferski pritisak: 700~1060 hPa
Temperatura i vlažnost prilikom čuvanja i transporta	Temperatura: -10°C~50°C Vlažnost: ≤93% Atmosferski pritisak: 700~1060 hPa

6

Upotreba aparata:




Odvojite gornji poklopac od donjeg poklopca povlačeći ga pravo ka gore. Nemojte savijati poklopce koristeći preteranu silu jer će oni skliznuti bez napora.


Ubacite 2 x 1.5V AA alkalne baterije vodeći računa o polaritetu baterija (+/-).

Proverite da li dva silikonska prstena pravilno leže u žljebovima. Vratite poklopce dok ne čujete "klik" zvuk.

- 4 Izaberite silikonski vrh koji odgovara veličini nozdrva pacijenta.
- 5 Proverite da li silikonski vrh lepo naleže na posudu za sekret.
- 6 Pažljivo ubacite silikonski vrh u nozdrvu pacijenta (ne previše duboko).
- 7 Pritisnite i držite taster nekoliko sekundi da usisate sekret iz nozdrve. Pustite taster kada želite da završite usisavanje sekreta.

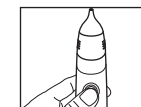

- Ukoliko je količina nakupljenog sekreta blizu preporučene maksimalne količine (oko 4 ml), očistite i osušite aparat pre upotrebe. Ne koristite aparat ukoliko je nivo sekreta u posudi blizu kanala za otvaranje (pogledajte ilustraciju desno).

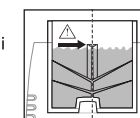

3

AC
ASIA CONNECTION

Primenjeni standardi

- Ovaj aparat ispunjava odredbe EC Direktive MDD (93/42/EEC). Sledeći standardi su primenjeni prilikom dizajniranja i proizvodnje ovog uređaja:
- IEC / EN 60601-1 Elektromedicinski uređaji - Deo 1: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse
 - IEC / EN 60601-1-2 Elektromedicinski uređaji - Deo 1-2: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi i ispitivanja
 - IEC/EN 60601-1-6 Elektromedicinski uređaji - Deo 1-6: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Upotrebljivost
 - IEC 60601-1-11 Elektromedicinski uređaji - Deo 1-11: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Zahtevi za elektromedicinske uređaje i medicinske električne sisteme koji se koriste u okruženju kućne zdravstvene nege
 - EN ISO 10993-5 Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 5: Ispitivanja citotoksičnosti in vitro
 - EN ISO 10993-10 Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 10: Ispitivanja iritacije i kasnog tipa preosetljivosti

PROIZVOĐAČ
Asia Connection Co., Ltd.
16 F-1, No.16, Jian Ba Rd.,
Chung Ho District, New Taipei City,
23511 Taiwan

CE 0120



LOT Pogledajte LOT oznaku na aparatu

EC REP

OVLASĆENI PREDSTAVNIK
ZA EVROPSKU UNIJU
Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +32 2.732.59.54
Fax: +32 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

Pročitajte uputstvo za upotrebu

BF tip primenjenog dela

IP22 Zaštita od čvrstih stranih objekata veličine Ø12.5 mm i većih; zaštita od vertikalno padajućih kapi vode kada je sklop nagnut pod uglom do 15°



AC8202X-20141009-V1